

Gebrauchsanweisung

Augentropfen, Emulsion

Lesen Sie bitte die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Produkts beginnen.

Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Ihre Beschwerden anhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

1. Was ist Cationorm® MD sine und wofür wird es angewendet?

Cationorm® MD sine ist eine sterile hypotonische unkonservierte Augentropfen-Emulsion in Form einer milchigen Lösung.

Cationorm® MD sine wird empfohlen zur Linderung von Symptomen trockener Augen, wie Stechen, Jucken oder Augenbrennen bzw. von Fremdkörpergefühl (Sandkorn- oder Staubgefühl) in den Augen. Diese Symptome können durch äußere Faktoren verursacht werden, wie z. B. Klimaanlage, Luftverschmutzung, Flugreisen, Bildschirmarbeit, refraktive Hornhautchirurgie (Sehkorrektur durch Augenlaserbehandlung), Tragen von Kontaktlinsen etc., oder auch durch eine Fehlfunktion der Meibomdrüsen (Lipidmangel bzw. falsche Lipidzusammensetzung im Tränenfilm) bedingt sein. Cationorm® MD sine befeuchtet, benetzt und schützt die Augenoberfläche.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Cationorm® MD sine beachten?

Cationorm® MD sine **darf nicht angewendet werden**, wenn Sie allergisch gegen einen der Bestandteile des Produkts sind.

Dieses Produkt **eignet sich nicht zur Behandlung anderer Augenerkrankungen.** Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Fragen haben.

Falls Sie derzeit noch weitere Augentropfen anwenden, sollten Sie zwischen den Verabreichungen der verschiedenen Augentropfen mindestens 5 Minuten warten. Es wird empfohlen, Cationorm® MD sine zuletzt zu tropfen.

Cationorm® MD sine ist mit allen Arten von Kontaktlinsen verträglich.

3. Wie ist Cationorm® MD sine anzuwenden?


ANWENDUNG AM AUGE.

Die empfohlene Dosis ist 1 Tropfen in jedes Auge 1- bis 4-mal täglich.

Anwendungsanleitung:



- Waschen Sie sich die Hände.
- Wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal anwenden, entfernen Sie den Sicherungsring der Verschlusskappe durch Ziehen an der Lasche.

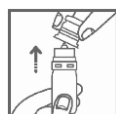

- Öffnen Sie die Flasche, indem Sie die Verschlusskappe vorsichtig nach oben abziehen.
- Beim erstmaligen Gebrauch der Flasche sollten Sie einen

Tropftest vornehmen, um zu sehen, wie stark und lange Sie drücken müssen, bis ein Tropfen abgegeben wird. Nachdem Sie die Verschlusskappe abgezogen haben, halten Sie die Flasche über ein Papiertuch oder einen Abfallbehälter und drücken Sie die Flasche leicht zusammen, um 1–2 Tropfen aus der Flasche auf das Papiertuch oder in den Abfallbehälter zu tropfen.

Durch diesen Test bekommen Sie ein Gefühl dafür, wie stark Sie drücken müssen, um einen einzigen Tropfen abzugeben. Die Flasche kann nun verwendet werden.

- Der Inhalt der Flasche ist ausreichend für die empfohlene Tagesdosis.
- Berühren Sie nicht die Spitze der Flasche, da dies zu einer Verunreinigung der Emulsion führen kann.



- Um das Produkt anzuwenden, beugen Sie den Kopf zurück und halten Sie die Flasche über das Auge.

Santen

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2021.

Legende:

Symbol				
Bedeutung	Hersteller	Unter 30 °C aufbewahren	Innerhalb von 3 Monaten nach Anbruch aufzubrauchen	Steril durch aseptische Methoden

Symbol				
Bedeutung	Chargenbezeichnung	Verfalldatum	Gebrauchsanweisung lesen	Nicht verwenden, wenn das Sterilbarriersystem des Produkts oder seine Verpackung beschädigt ist


- Ziehen Sie das untere Augenlid sanft nach unten und schauen Sie dabei nach oben.
- Drücken Sie die Flasche sanft und gleichmäßig in der Mitte zusammen und lassen Sie einen Tropfen auf die Augenoberfläche fallen. Berühren Sie dabei weder Augen noch Wimpern mit der Spitze der Flasche. Beachten Sie, dass der Tropfen erst nach einer kurzen Verzögerung aus der Flasche kommt.
- Drücken Sie nicht zu stark.
- Blinzeln Sie einige Male, damit sich der Tropfen im Auge verteilt.
- Die Flasche lässt sich wahrscheinlich schwerer zusammendrücken, wenn sie fast leer ist.



- Schütteln Sie die Flasche nach dem Gebrauch und vor dem Wiederaufsetzen der Verschlusskappe einmal mit der Tropferspitze nach unten, um eventuelle Flüssigkeit an der Spitze zu entfernen. Dies

dient dazu, die Spitze von Resttropfen zu befreien, bevor der nächste Tropfen abgegeben wird. Wischen Sie die Tropferspitze nicht mit der Hand oder einem anderen Utensil ab.

- Versuchen Sie, die Tropferspitze nicht zu berühren. Warten Sie 3 Sekunden, bevor Sie einen Tropfen in das andere Auge geben.

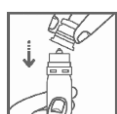

- Stecken Sie nach jedem Gebrauch die Verschlusskappe wieder fest auf die Flasche.
- Bewahren Sie die Flasche in ihrem Umkarton auf, wenn Sie sie nicht benutzen.

Verwenden Sie Cationorm® MD sine NICHT länger als 3 Monate nach dem ersten Öffnen der Flasche.

Wenn Sie die geöffnete Flasche länger als 3 Monate nach dem ersten Öffnen verwenden, besteht ein hohes Risiko einer Verunreinigung des Produkts.

4. Was sind mögliche Nebenwirkungen?

In sehr seltenen Fällen können vorübergehende Beschwerden wie eine Reizung des Auges, Augenschmerzen, Fremdkörpergefühl im Auge, Rötung des Auges, Jucken des Auges, wässrige Augen, brennendes Gefühl im Auge, vorübergehendes verschwommenes Sehen, Entzündung der Augenlider oder Schwellung der Augenlider auftreten. Diese Symptome sind auch Teil der typischen Krankheitszeichen bei trockenen Augen. WENN SIE NEBENWIRKUNGEN BEMERKEN, DIE NICHT IN DER PACKUNGSBEILAGE ANGEZEIGT SIND, WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN ARZT ODER APOTHEKER.

5. Wie ist Cationorm® MD sine aufzubewahren?

Bewahren Sie die Flasche in ihrem Umkarton bei einer Temperatur unter 30 °C auf.

Nicht in einem feuchten Raum aufbewahren.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht anwenden, wenn die Flasche beschädigt ist.

Nicht nach dem auf dem Umkarton aufgedruckten Verfalldatum verwenden. Innerhalb von 3 Monaten nach Anbruch aufbrauchen.

Vermerken Sie hier das Datum des Anbruchs der Flasche:

Cationorm® MD sine enthält: Paraffinöl, Glycerol, Tyloxapol, Poloxamer 188, Tris-Hydrochlorid, Tromethamin, Cetalkoniumchlorid (als kationische Substanz) und gereinigtes Wasser.

Jede Flasche Cationorm® MD sine enthält 10 ml sterile Emulsion.

Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren Arzt/Apotheker oder an eine Niederlassung von Santen in Ihrer Nähe unter www.santen.eu.



0459



Hersteller:
Santen
1, rue Pierre Fontaine
Bâtiment Genavenir IV
91000 Evry-Courcouronnes
Frankreich